

► SV Pumpset I DA Pumpesæt I FI Pumppupakkaus I NO Pumpesett I PL Zestaw do odciągania pokarmu

Före första användningen I Før du bruger produktet første gang I Ennen ensimmäistä käyttöä I Før første gangs bruk I Przed pierwszym użyciem

I Kontrollera att delarna inte är skadade

I Efterse alle delene for skader

I Tarkista kaikki osat vaurioiden varalta

I Kontroller alle delene for skader

I Sprawdzić, czy żadna z części nie jest uszkodzona

1



I Rengör delarna noggrant


I Vask delene grundigt

I Pese osat perusteellisesti

I Vask delene grundig

I Dokładnie umyć części zestawu

2

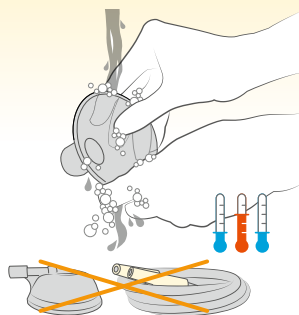

I Koka i minst 5 minuter


I Kog i mindst 5 minutter

I Keitä vähintään 5 minuuttia

I Kok i minst 5 minutter

I Gotować przez co najmniej 5 minut

3

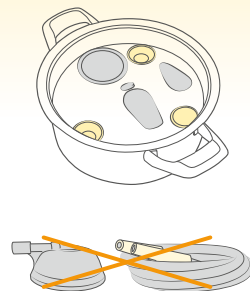


Se bruksanvisningen för mer detaljerad information I Nærmere oplysninger kan findes i brugsanvisningen I Katso tarkemmat tiedot käyttöohjeista I Se bruksanvisningen for mer informasjon I Bardziej szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi

# PersonalFit™ PLUS



► **SV** Brösträtt | **DA** Brysttragt | **FI** Rintakuppi | **NO** Brysttrakt | **PL** Lejek

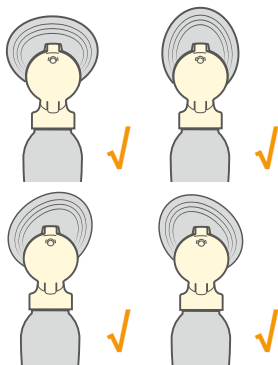

I Bröstratten PersonalFit PLUS är oval och kan vridas (360°) och placeras på det sätt som är mest bekvämt för dig.

I PersonalFit PLUS brysttragten er oval og kan drejes (360°) og placeres i den position, der er mest behagelig for dig.

I PersonalFit PLUS -rintakuppi on soikea. Sitä voi kiertää (360°), ja voit asettaa sen asentoon, joka tuntuu sinusta mukavimmalta.

I PersonalFit PLUS brysttrakten er oval og kan roteres (360°) og plasseres i den ønskede posisjonen som er mest behagelig for deg.

I Lejek PersonalFit PLUS ma kształt owalny i może być używany pod dowolnym kątem obrotu (360°) w pozycji, która zapewni największą wygodę użytkowania.

► **SV** Förvaring av bröstmjölk  
**DA** Opbevaring af brystmælk  
**FI** Rintamaidon säilytys  
**NO** Oppbevaring av brystmelk  
**PL** Przechowywanie mleka matki

	16–26°C 60–78°F		≤ 4°C ≤ 39°F		-18 – -20°C 0 – -4°F
	≤ 6 h		≤ 5 d		≤ 180 d (-18°C/ 0°F) ≤ 365 d (-20°C/-4°F)
	≤ 4 h		≤ 4 d		≤ 90 d